

## FICHA TECNICA

**Apósito de espuma hidrofílica**

**Askina® Foam**

### 1.0 DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Askina® Foam es un apósito de espuma no adhesiva compuesto de 2 capas: una espuma hidrofílica de poliuretano con alta capacidad de absorción y un film de poliuretano fino, transparente y protector, impermeable al agua y resistente a bacterias.

#### **Composición:**

Capa 1: Suave capa de espuma hidrofílica de poliuretano que respira y con alta capacidad de absorción.

Capa 2: Film de poliuretano fino, transparente y protector, impermeable al agua y resistente a bacterias.

### 2.0 APLICACIONES:

#### 2.1 **Indicaciones:**

Se recomienda el uso de Askina® Foam en las heridas de profundidad parcial a total con exudado moderado a alto tales como:

- Úlceras por presión Grado I - IV
- Incisiones quirúrgicas
- Quemaduras de primer y segundo grado
- Se puede utilizar Askina® Foam como prevención en rupturas de la piel.

#### 2.2 **Contra-indicaciones:**

- En úlceras resultantes de infecciones, tales como tuberculosis, sífilis, o infecciones fúngicas profundas, o quemaduras de tercer grado.
- Mordeduras o quemaduras de tercer grado

En caso de infección con aspectos inflamatorios, (aumento de temperatura, edema, dolor, enrojecimiento), dar aviso al médico. Utilizar de nuevo el apósito cuando las condiciones de curación normales estén de nuevo presentes. Uso único.

### 3.0 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- No- adhesivo
- Alta capacidad de absorción
- Suave y flexible
- Promueve y mantiene un medio ambiente húmedo que favorece el proceso natural de regeneración
- Retiene el exudado

## FICHA TECNICA

**Apósito de espuma hidrofílica**

**Askina® Foam**

### 4.0 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

#### 4.1 Físico

<u>Producto</u>	<u>Valores</u>	<u>Métodos del test</u>
Color	Blanco – blanco invierno	Visual
Adherencia	6.5 ± 0.5mm	BBH 11.87
Absorción	> 15g/25cm <sup>2</sup>	BBH 11.89
Transmisión del vapor	1000g/m <sup>2</sup> /24hrs	BBH 11.27

\*Los métodos de los tests están disponibles según demanda

#### 4.2 Dimensiones

Tamaño	Unidades/Caja	Referencia
5x7cm	10	7240710
10x10cm	10	7241010
10x20cm	10	7241210
15x20cm	10	7241510
20x20cm	5	7242005

#### 4.3 Test de biocompatibilidad

Test	Informe	Resultado
Irritación o hipersensibilidad retardada	HOSP 210	No hubo reacción
Test Kligman Estudio de Maximización de Sensibilización	HOSP 211	Grado 1; sin signos de eritema y edema
Estudio de Citotoxicidad usando el Método Elution ISO	HOSP 212	Grado 1; ligera reactividad considerada no tóxica

### 5.0 PRESENTACIONES

Referencia	Descripción	Tamaño	Unidades por caja	Caja por caja americana	Caja Americana por pallet
7241010	Askina Foam	10*10	10	6	85
7241210	Askina Foam	10*20	10	6	55
7242010	Askina Foam	20*20	10	3	55