

## Ficha Técnica

**Apósitos de espuma**

**Askina® Foam Sacrum**  
**Askina® Foam Border**

### 1.0 DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Askina® Foam Border y Askina® Foam Sacrum son apósitos de espuma hidrofílica compuesta de una espuma hidrofílica que permite el intercambio gaseoso con alto poder de absorción y un film de poliuretano adhesivo de 3 mm de ancho alrededor para mayor adhesividad.

#### **Composición:**

- Capa 1: Una capa adhesiva que adhiere a la piel intacta pero no adhiere a la herida; el contacto con el exudado suaviza el adhesivo.
- Capa 2: Una capa de espuma de poliuretano que respira y con alta capacidad de absorción. Esta capa también cubre la herida.
- Capa 3: Un film fino transparente de poliuretano que es impermeable al agua y a bacterias pero permite la transmisión del vapor de agua. Este film está estrechamente unido a la capa de espuma.
- Capa 4: Un film fino transparente de poliuretano que es impermeable al agua y a bacterias pero permite la transmisión del vapor de agua, y se extiende más allá de las capas exteriores para formar un borde adhesivo.

### 2.0 APLICACIONES:

#### 2.1 **Indicaciones:**

- **Askina® Foam Border and Askina® Foam Sacrum** se indican para heridas de espesor parcial o total, úlceras por presión estadio I-IV, úlceras de pierna venosas y arteriales, especialmente indicado para áreas de difícil localización.

#### 2.2 **Contra-indicaciones:**

- En úlceras resultando de infecciones, tales como tuberculosis, sífilis, profundas infecciones fúngicas o quemaduras de tercer grado.
- Mordeduras o quemaduras de tercer grado.
- En caso de infección con aspectos inflamatorios (temperatura, edema, rojez, dolor), preguntar aviso médico. Usar de nuevo los apósitos cuando las condiciones de curación estén de nuevo presentes.
- Uso único.
- No utilizar el producto si la caja está deteriorada o abierta.

## Ficha Técnica

<b>Apósitos de espuma</b>	<b>Askina® Foam Sacrum Askina® Foam Border</b>
---------------------------	--

### 3.0 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta seguridad – adhesivo en todas partes
- Adhesivo fuerte que se suaviza al contactar el exudado
- Alta capacidad de absorción
- Fácil de aplicar
- Forma triangular especialmente adaptada para la zona sacra

### 4.0 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

#### 4.1 Físico

Producto	Valores	Método del Test
Color	Blanco – blanco invierno	Visual
Espesor	4.1 ± 0.5mm	BBH 11.87
Absorción	> 9g/25cm <sup>2</sup>	BBH 11.89
Transmisión de la humedad por vapor	1000g/m <sup>2</sup> /24hrs	BBH 11.27

\*Métodos del test están disponibles según demanda.

#### 4.2 Dimensiones

Nombre	Tamaño	Unidades/Caja	Referencia
Askina® Foam Border	16x16cm	10	7231610
Askina® Foam Border	16x26cm	10	7236610
Askina® Foam Border	26x26cm	10	7232610
Askina® Foam Sacrum	18x20cm	10	7228210

## Ficha Técnica

<b>Apósitos de espuma</b>	<b>Askina® Foam Sacrum Askina® Foam Border</b>
---------------------------	--

### 4.3 Test de biocompatibilidad

Test	Resultado	Reporte del Test
Irritación o hipersensibilidad retardada	No hubo reacción (Método de medición ISO 10993-10)	HOSP 210
Test de Maximización de Sensibilización	Grado 1; sin signos de eritema y edema	HOSP 211
Estudio de Citotoxicidad usando el Método Elution ISO	Grado 1; ligera reactividad considerada no tóxica	HOSP 212

### 5.0 PRESENTACIONES:

Referencia	Descripción	Tamaño	Unidades por caja	Medida de la caja (mm)	Caja por caja americana	Caja Americana por pallet
<b>7231610</b>	Askina Foam Border	16*16	10	228x50x272	4	105
<b>7236610</b>	Askina Foam Border	16*26	10	228x50x366	6	48
<b>7232605</b>	Askina Foam Border	26*26	5	321x28x366	3	48
<b>7228025</b>	Askina Foam Sacrum	18*20	5	254x28x311	8	85